


Руководство пользователя Lumiflex Cloud для аккаунта Врача

1	Как зарегистрироваться в облачном сервисе?.....	13
2	Как войти в свой аккаунт после регистрации?.....	15
3	Как добавить нового пациента?.....	16
4	Как настроить обмен данных об уровне глюкозы с пациентом?.....	17
5	Как сформировать отчет AGP?.....	19
6	Как фильтровать пациентов по уровню глюкозы в крови?.....	20
7	Настройки вашего личного профиля.....	21
8	Предполагаемое использование облачного сервиса Lumiflex Cloud.....	22

Как зарегистрироваться в облачном сервисе?

1 Перейдите на официальный сайт <https://lumiflex.ru>, нажмите кнопку «Облачный сервис» и выберите «Войти в кабинет». Также вы можете использовать прямую ссылку <https://cloud.lumiflex.ru/login>




2 Нажмите на кнопку «Зарегистрироваться» и на следующей странице выберите аккаунт «Больница/Врач». Следуйте пошаговой инструкции, заполните необходимую информацию для создания аккаунта, выберите страну и придумайте пароль

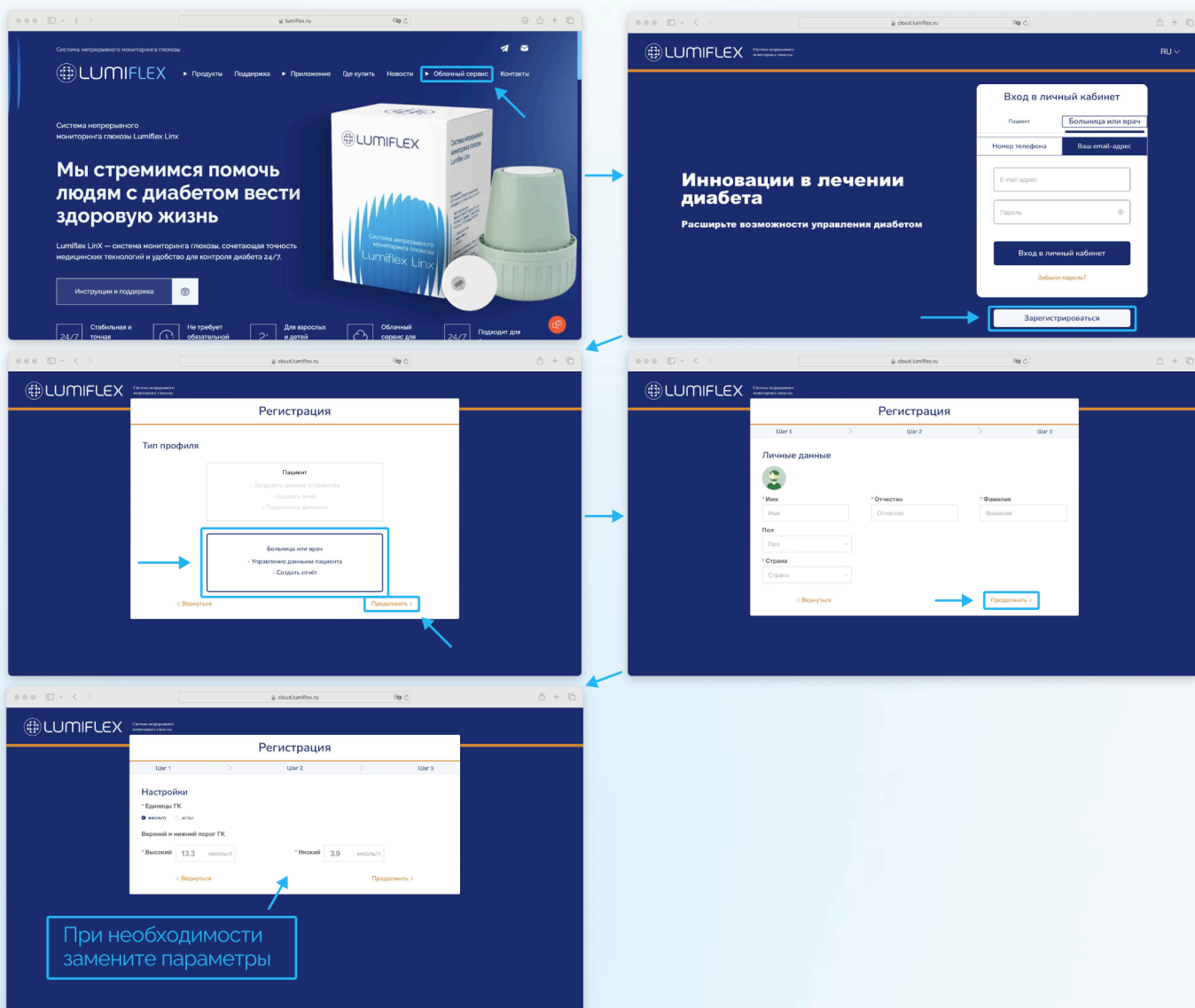

The registration process consists of the following steps:

- Step 1:** Main website with the 'Облачный сервис' (Cloud service) button highlighted.
- Step 2:** Login page with the 'Зарегистрироваться' (Register) button highlighted.
- Step 3:** Registration page, 'Больница или врач' (Hospital or doctor) account type selected.
- Step 4:** Personal data form (Шаг 1) with fields for name, surname, and country.
- Step 5:** Settings form (Шаг 2) with fields for high and low glucose thresholds.
- Step 6:** Confirmation screen (Шаг 3) with a 'При необходимости замените параметры' (If necessary, replace the parameters) note.

3 На данной странице выберите один из двух вариантов регистрации: по номеру телефона или email-адресу — тот, который вам наиболее удобен

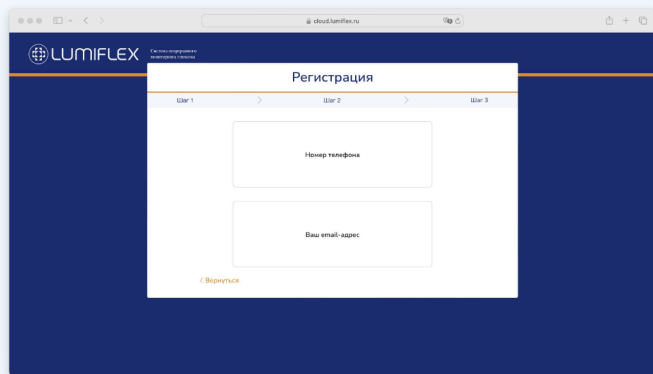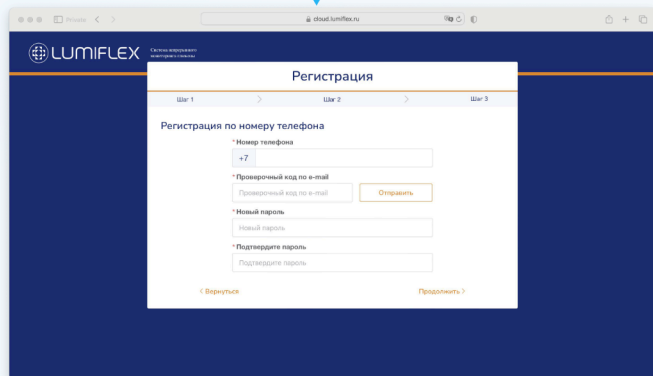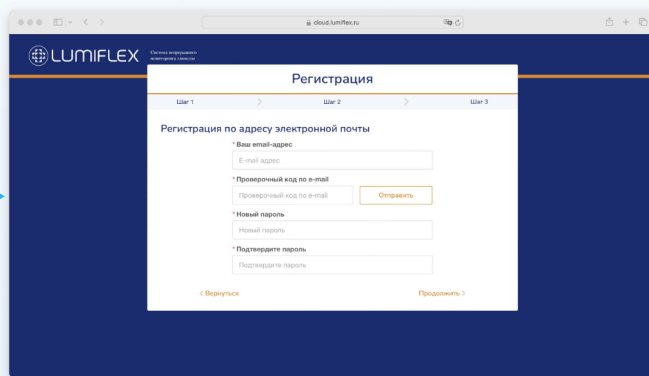1. Регистрация по номеру телефона:

Введите номер телефона

Нажмите кнопку **«Отправить»**.

Вам поступит СМС с кодом.

Введите его в поле

«Проверочный код»

Придумайте пароль в строке

«Новый пароль»,

продублируйте его в строке

«Подтверждение пароля»

2. Регистрация по Email-адресу:

Введите ваш Email

Нажмите на кнопку

«Отправить». Вам поступит письмо с кодом. Введите его в поле **«Проверочный код»**

Придумайте пароль в строке


«Новый пароль»,

продублируйте его в строке

«Подтверждение пароля»

Как войти в свой аккаунт после регистрации?

- 1 Выберите вкладку «**Больница или Врач**» для входа
- 2 Выберите метод входа такой же как при регистрации «**Номер телефона**» или «**Ваш email-адрес**»
- 3 Введите номер телефона или свой email и свой пароль
- 4 Нажмите кнопку «**Вход в личный кабинет**»

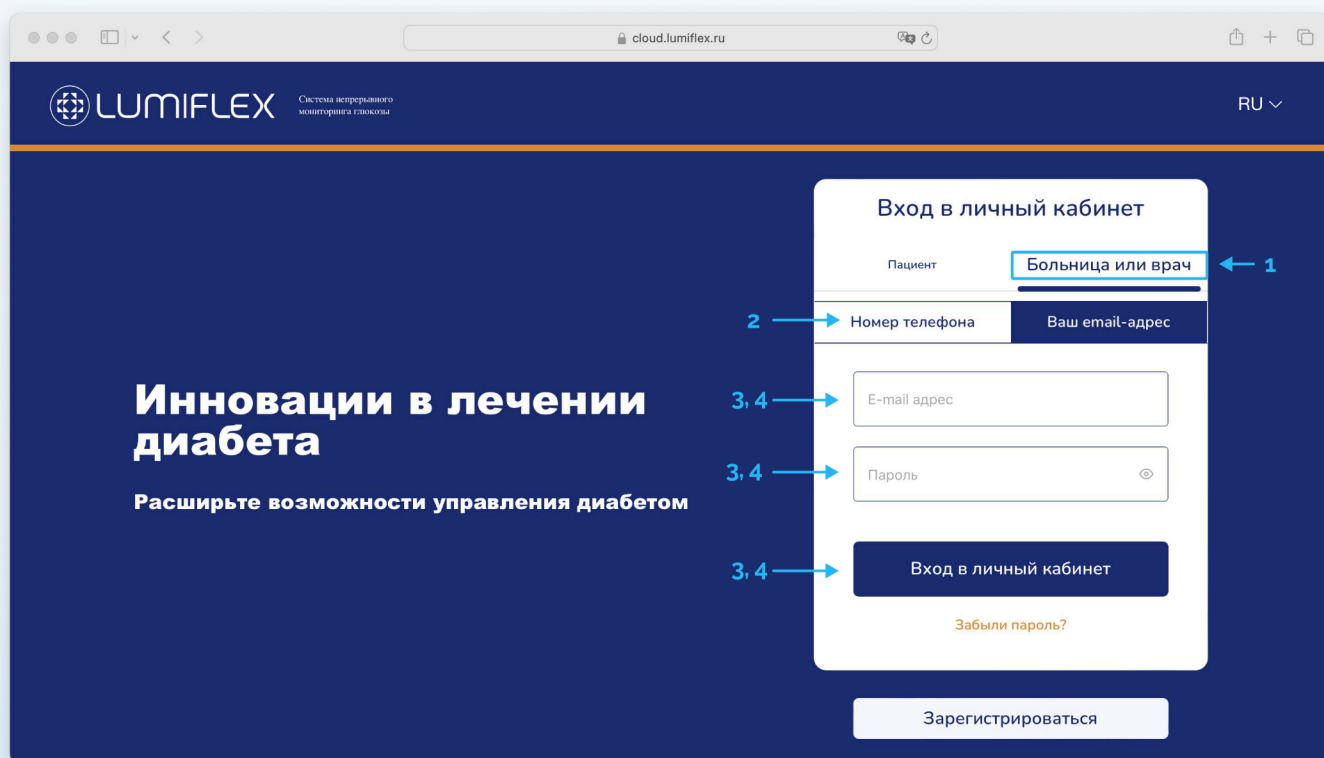

The screenshot shows the LUMIFLEX login interface. The header includes the LUMIFLEX logo and the text 'Система непрерывного мониторинга глюкозы'. The main content area has a dark blue background with the text 'Инновации в лечении диабета' and 'Расширьте возможности управления диабетом'. A white login form is overlaid on the right. The form has a title 'Вход в личный кабинет' and two tabs: 'Пациент' and 'Больница или врач'. The 'Больница или врач' tab is selected and highlighted with a blue arrow and the number 1. Below the tabs are two input fields: 'Номер телефона' and 'Ваш email-адрес'. The 'Ваш email-адрес' field is highlighted with a blue arrow and the number 2. Below these are two more input fields: 'E-mail адрес' and 'Пароль'. Both are highlighted with blue arrows and the numbers 3, 4. Below the password field is a button 'Вход в личный кабинет', also highlighted with a blue arrow and the numbers 3, 4. Below the button is a link 'Забыли пароль?'. At the bottom of the form is a button 'Зарегистрироваться'. The browser's address bar shows 'cloud.lumiflex.ru'.

Забыли пароль?


Если вы забыли пароль, нажмите кнопку «**Забыл пароль**» и следуйте инструкциям для смены

RU ▾

Если необходимо сменить язык, то выберите предпочитаемый язык из доступных вариантов

Как добавить нового пациента?

- 1 Нажмите на кнопку «**Пациенты**» в левой колонке главной страницы, чтобы сразу перейти к списку пациентов
- 2 Нажмите кнопку «**+Добавить нового пациента**» в центре экрана
- 3 Введите данные о пациенте и нажмите на кнопку «**Добавить**»

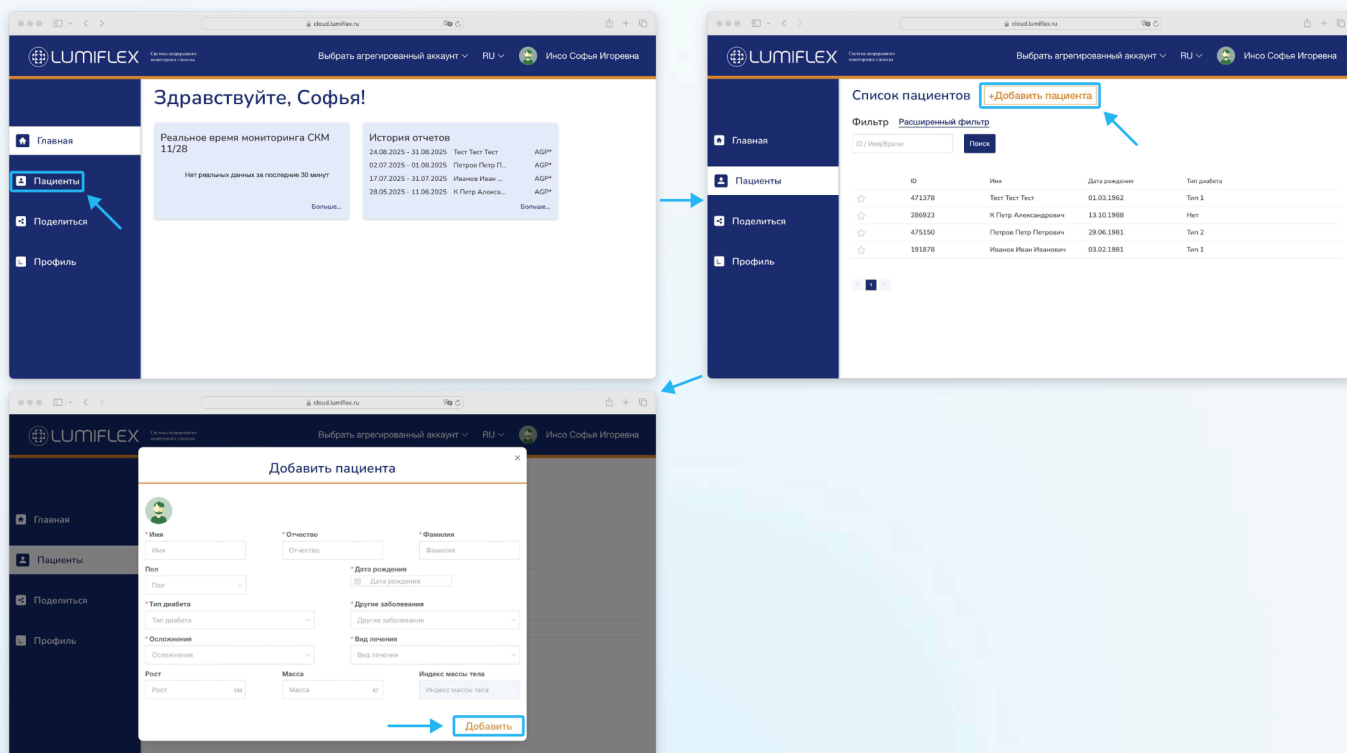

The screenshots illustrate the process of adding a new patient in the LUMIFLEX system:

- Скриншот 1:** Главная страница. В левой панели меню нажимается «Пациенты».
- Скриншот 2:** Страница «Список пациентов». В верхнем правом углу нажимается кнопка «+Добавить пациента».
- Скриншот 3:** Форма «Добавить пациента». Заполняются поля: Имя, Отчество, Фамилия, Пол, Дата рождения, Тип диабета, Другие заболевания, Вид лечения, Рост, Масса, Индекс массы тела. Внизу нажимается кнопка «Добавить».




После нажатия кнопки «Добавить» и обновления страницы, появится новая строка с ФИО пациента. Теперь нужно настроить обмен данными с пациентом

Как настроить обмен данными об уровне глюкозы с пациентом?


1

Выберите нужного пациента из вашего списка – нажмите на строку с ФИО

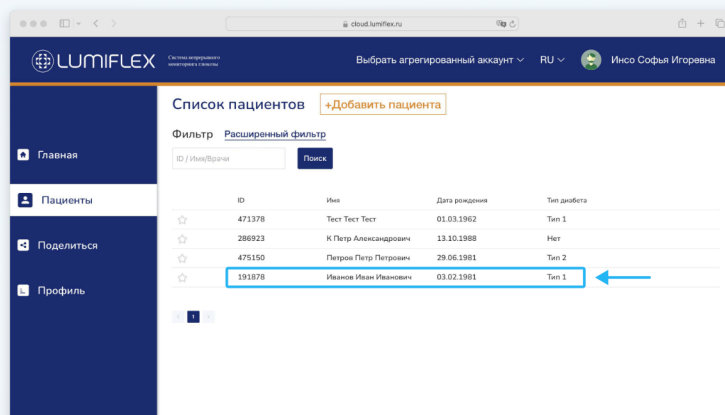


2

В окне профиля пациента нажмите на кнопку «Получить разрешение пользователя»


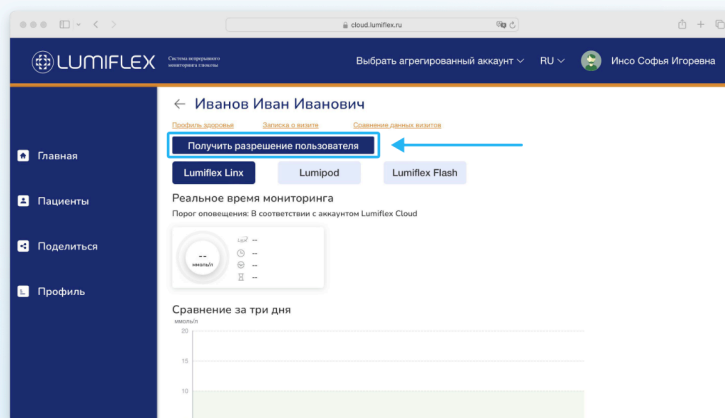


3

Нажмите на кнопку «Обмен приложениями по номеру телефона»

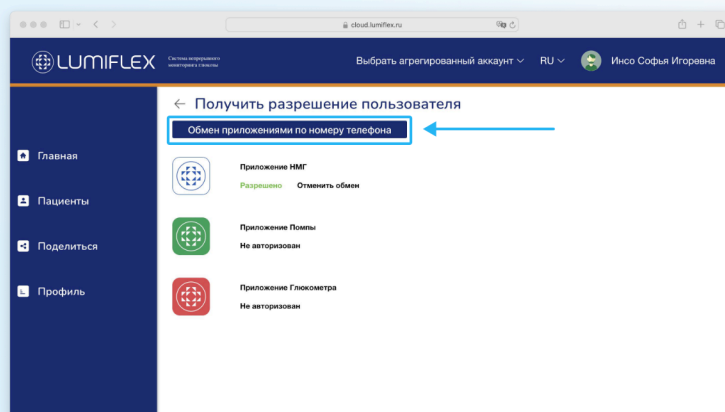


- 4 Введите номер телефона пациента, на который пациент зарегистрировал приложение в своем телефоне, и нажмите на кнопку **«Поиск»**
- 5 Нажмите для синхронизации на нужное приложение и далее на кнопку **«Поделиться»**

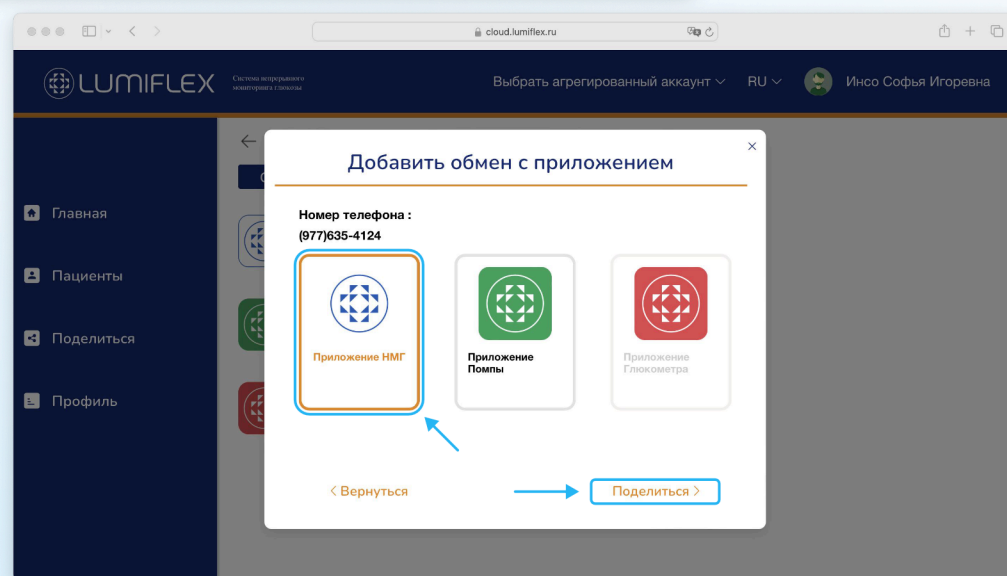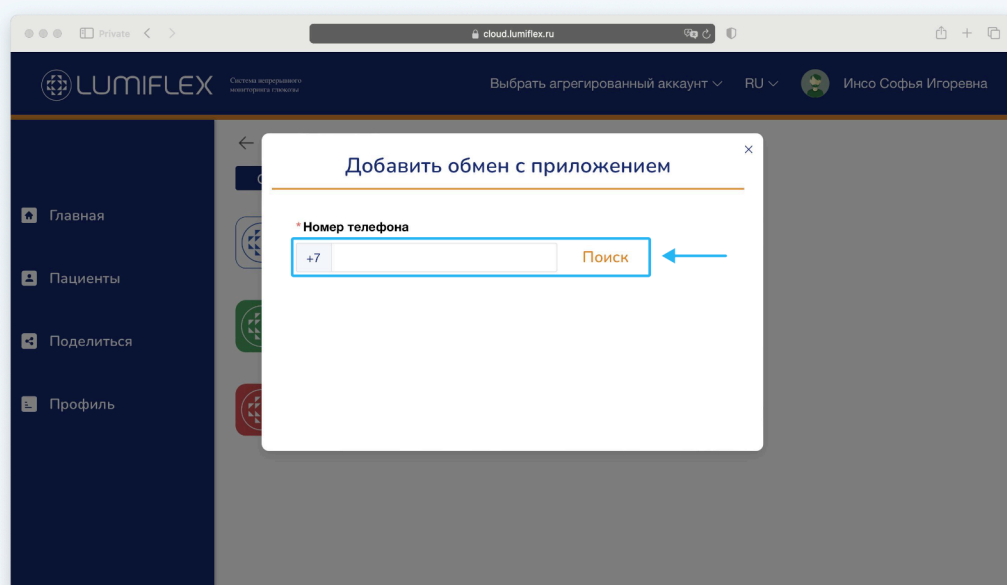

- 6 Пациенту на телефон поступит СМС где он подтверждает свое согласие на обмен данными

Как сформировать отчет AGP?

- 1** Выберите пациента и нажмите на строчку с его ФИО
- 2** Меню отчетов находится внизу главной страницы пациента
- 3** Выберите необходимый период дней. Либо из предустановленных: 7, 14, 30, 90 дней, либо любое количество дней, выбрав пункт «**Настраиваемый**»
- 4** После того, как вы установили период отчета, нажмите на кнопку «**Создать отчет**». Отчет будет автоматически создан

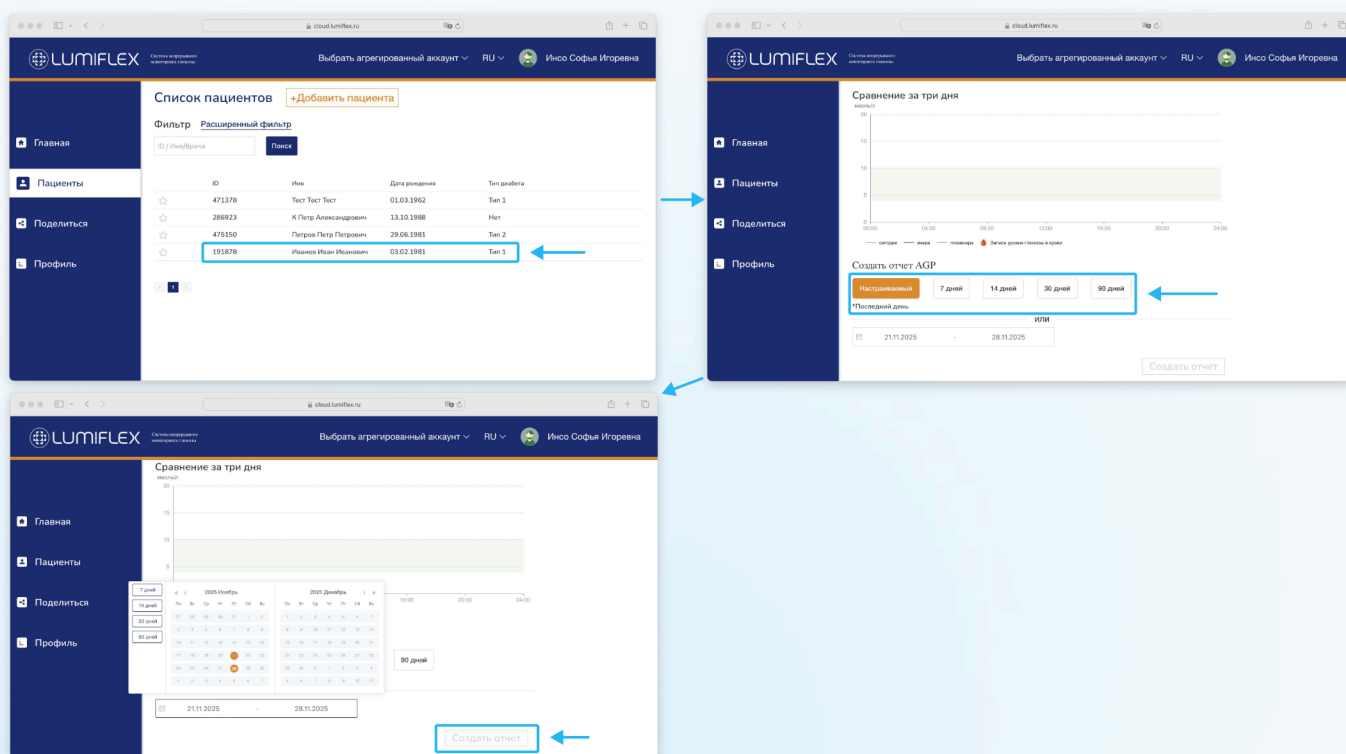


ВАЖНО: Отчет не открывается из иконки «**загрузки отчета**» в правом верхнем углу экрана. Она является информационной и показывает только время формирования отчета! Сам отчет вы сможете найти на «**Главной**» странице в разделе «**Запись отчета**»

Как фильтровать пациентов по уровню глюкозы в крови?

1 На главной странице нажмите на карточку «Реальное время мониторинга СКМ»

Настройка фильтра отображения пациентов по выбранным вами параметрам находится в блоке «Тип оповещения». Стандартно

2 там включена функция «Все». Если на нее нажать, откроется выпадающий список фильтров. Выберите нужный фильтр и нажмите «Поиск»

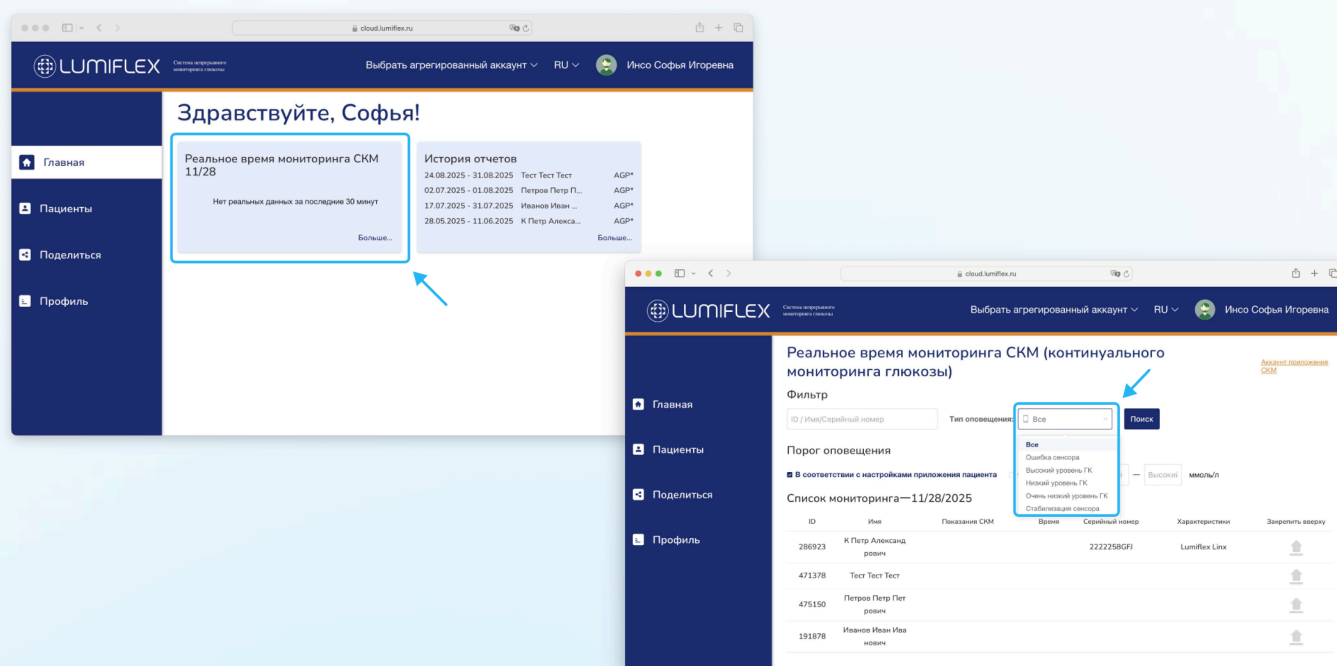


После этого, ниже в списке, отобразятся только те пациенты, которые подходят под выбранный вами фильтр

Настройки вашего личного профиля

1 Нажмите на значок «**Профиль**» в левой колонке главной страницы, чтобы перейти в меню управления профилем

Добавьте дополнительный вариант входа отличный от того, по которому вы регистрировались. Если при регистрации вы использовали Email, то добавьте так же вход по телефону. И наоборот. После этого вы сможете входить в свой аккаунт используя или Email или Телефон

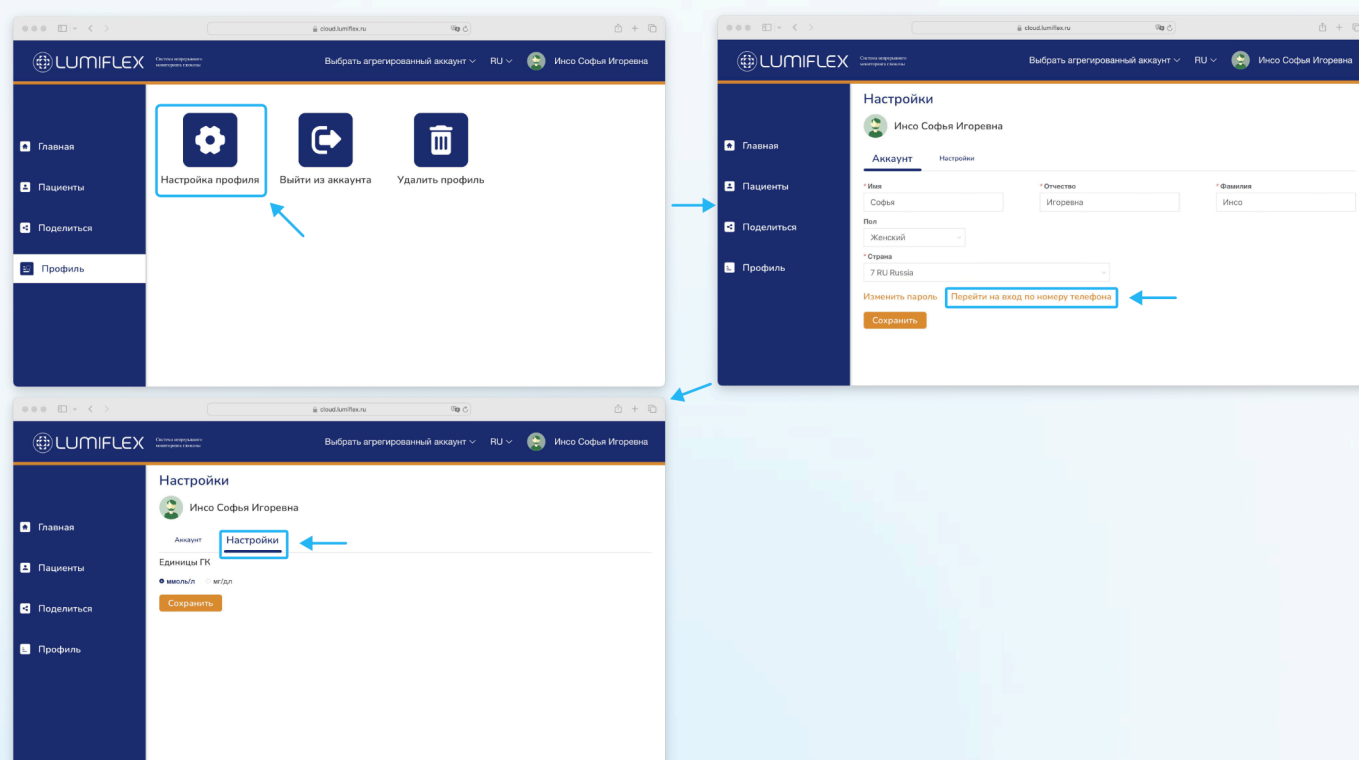

3 Вкладка «**Настройки**» позволяет изменять параметры, связанные с отображением Единиц ГК

Предполагаемое использование облачного сервиса Lumiflex Cloud

Lumiflex Cloud предназначен для использования медицинскими работниками с целью помощи людям с диабетом и их лечащим врачам в просмотре, анализе и оценке данных с устройств контроля уровня глюкозы за прошедший период времени для более эффективного управления диабетом.

Дополнительно:



Lumiflex Cloud является вспомогательным средством просмотра данных и не предназначен для принятия решений по лечению или замены профессиональной медицинской консультации



Lumiflex Cloud не предназначен для немедленного принятия клинических решений и не заменяет самоконтроль уровня глюкозы, рекомендованный лечащим врачом



Медицинские работники должны использовать данные из Lumiflex Cloud в совокупности с другой доступной им клинической информацией